

Meilleures pratiques pour le nettoyage des connecteurs électriques des accessoires Sapphire

TOUJOURS suivre les instructions fournies dans la section portant sur l'entretien du manuel d'utilisation ou du manuel d'entretien de votre pompe à perfusion Sapphire. Utiliser des solutions de nettoyage de qualité médicale qui sont recommandées pour le nettoyage de la pompe à perfusion Sapphire. **NE PAS** utiliser de produits chimiques qui peuvent endommager les composants électriques et empêcher les instruments de fonctionner correctement ou qui peuvent annuler votre garantie.

La liste des produits de nettoyage approuvés se trouve sur le site <https://www.Qcore.Com/support> → Garantie, approvisionnement et entretien → Foire aux questions (FAQ).

La présente directive fournit des instructions recommandées pour un nettoyage approprié des connecteurs électriques des accessoires de la pompe à perfusion Sapphire.

Le nettoyage des connecteurs électriques de tous les accessoires est limité à l'utilisation d'alcool isopropylique à 70 % UNIQUEMENT.

1

Placer l'accessoire sur une surface propre et stable


2

Mettre une petite quantité d'alcool isopropylique à 70 % sur un chiffon ou une éponge

3

Presser le chiffon ou l'éponge avant de procéder au nettoyage afin que le produit ne s'égoutte pas sur l'accessoire à nettoyer

4

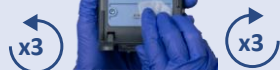

Nettoyer dans un mouvement de rotation en faisant au moins trois rotations bidirectionnelles (dans le sens horaire et dans le sens antihoraire)*

5

Procéder avec précaution et éviter de laisser couler le réactif dans les broches ou les pores du connecteur électrique

6

Laisser sécher l'alcool isopropylique pendant au moins trois minutes avant d'allumer l'appareil

*Prendre garde de ne pas appliquer de pression excessive sur le connecteur pendant le nettoyage

Boîtier de sécurité pour ACP 250 mL



Mini-support avec bloc d'alimentation intégré



Connecteur de répartition



Mini-support avec connecteur de répartition



Bloc-piles externe Sapphire



Connecteur/poignée bolus, source d'alimentation



Assistance technique

Pour les questions techniques, l'assistance au dépannage ou la déclaration d'événements inattendus, communiquez avec le représentant ou le distributeur de votre région.

Service à la clientèle aux États-Unis

Téléphone : 877-541-9944 | 949-303-7845

Courriel : customerservice@eitangroup.com

Vous pouvez également communiquer avec le service d'assistance de Q Core Medical Ltd. à l'adresse suivante : support@Qcore.com